

Gebrauchsanleitung

Beistell-Tisch Basic

Art.-Nr. 11209 000 weiß
Art.-Nr. 11209 100 Buche Dekor

PHV-Nr. 50.45.04.0011
PHV-Nr. 50.45.04.0011

PZN 00828437
PZN 00828420



Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Anwendung genau durch, befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf! Wird dieses Hilfsmittel von anderen Personen verwendet, müssen diese vor der Benutzung über die hier angegebenen Hinweise vollständig informiert werden.

Indikation

Der Beistelltisch ist dafür vorgesehen in Verbindung mit einem Kranken- oder Pflegebett verwendet zu werden. Er dient den Patienten und Pflegebedürftigen, die überwiegend bettlägerig sind, in der täglichen Pflege-Praxis als wertvolle Unterstützung, z. B. bei der selbstständigen Körperpflege im Bett, beim Essen und Trinken im Bett oder auch bei therapeutischen Maßnahmen. Nicht eingeschränkten Anwendern dient der Beistell-Tisch als praktischer Helfer im Alltag, z. B. beim Schreiben, Lesen, Essen und vielem mehr.

Kontraindikation


Es bestehen keine Kontraindikationen.

Sicherheitshinweise

- Überzeugen Sie sich vor der Benutzung von der Funktionsfähigkeit, Stabilität und dem ordnungsgemäßen Zustand des Beistell-Tisches und des Zubehörs!
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität und die Festigkeit des Produktes und ggf. den festen Sitz der Schrauben!
- Beachten Sie unbedingt die maximale mittige Belastbarkeit des Beistell-Tisches von 10 kg bei horizontaler Positionierung!
- Verwenden Sie den Beistell-Tisch nicht als Aufrichtehilfe aus dem Liegen!
- Lehnen oder stützen Sie sich nicht auf den Beistell-Tisch!
- Stellen Sie im Stand immer alle 4 Räder fest!
- Benutzung durch Kinder nur unter Aufsicht von Erwachsenen – Klemm- und Kippgefahr!
- Vermeiden Sie den Kontakt von heißen Gegenständen mit der Tischplatte!

Lieferumfang

1. Tischplatte
 2. Feststellschraube (zur Fixierung der Tischplatte)
 3. Unterlegscheibe
 4. Befestigungskappe (zur Fixierung der Tischplatte, vormontiert)
 5. Dreieckplatte Metall (zur Fixierung der Tischplatte, vormontiert)
 6. Dreieckplatte Metall mit Lochung (zum Einstellen des Neigungswinkels der Tischplatte, vormontiert)
 7. Fixierstange der Tischplatte
 8. Metallstift (vormontiert)
 9. Gewindebolzen (vormontiert)
 10. Kugelknopf (zur Fixierung und zum Einstellen des Neigungswinkels der Tischplatte, vormontiert)
 11. L-Stange
 12. Kunststoff-Stopfen (vormontiert)
 13. 2 Fußgestelle
 14. 4 Kunststoff-Schutzkappen (vormontiert)
 15. 4 Räder mit Bremsen (bereits am Fußgestell befestigt)
 16. 2 Schrauben (zur Befestigung des Fußgestells)
 17. 2 Unterlegscheiben
- 1 Feststellschraube für die Höhenverstellung
1 Sechskantschlüssel

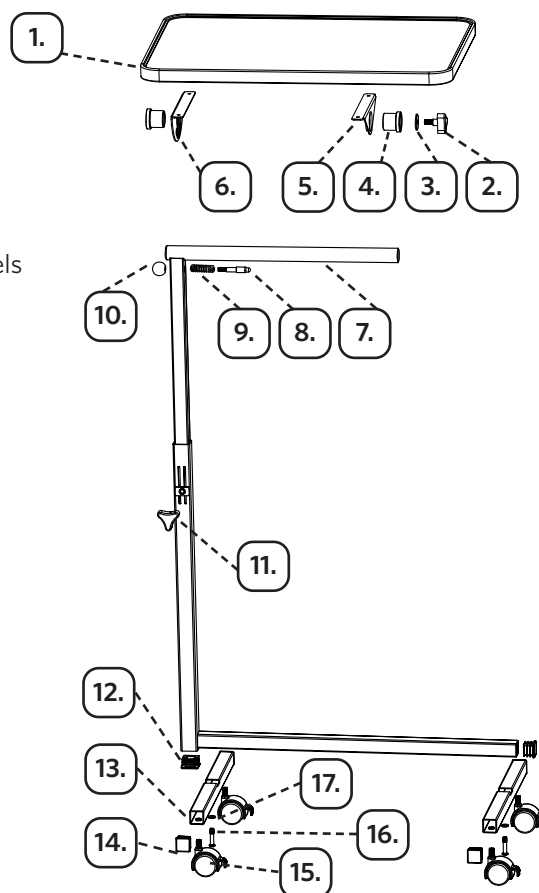

Montage

Die beiden Fußgestelle (13), die mit jeweils 2 Rädern (15) versehen sind, mit den Sechskantschrauben (16) und den Unterlegscheiben (17) unter der Basis der L-Stange befestigen. Dabei darauf achten, dass die Füße mit dem beigefügten Sechskantschlüssel an den richtigen, markierten Stellen (A zu A, B zu B, C zu C und D zu D) befestigt werden.

Das Halterungsrohr für die Tischplatte in den senkrechten Teil der L-Stange (11) schieben. In das Loch der L-Stange die Feststellschraube für die Höhenverstellung festdrehen.

Die Tischplatte (1) auf die Fixierstange der Tischplatte (7) waagrecht schieben und mit der Feststellschraube (2) inkl. Unterlegscheibe (3) festdrehen.

Anwendung

Einstellen des Beistelltisches:

1. Positionieren der Tischplatte


Die Tischplatte kann wahlweise waagrecht oder schräg eingestellt werden. Zum Verändern des Neigungswinkels ziehen Sie mit der einen Hand den Kugelknopf an der Seite und stellen mit der anderen Hand die gewünschte Neigung der Tischplatte ein. Das Loslassen des Kugelknopfes fixiert die Position durch das Einrasten des Metallstiftes (8) in die vorgesehene Lochung der Dreieckplatte (6). Durch Feststellen der Tischplatte in die vorgegebenen Lochungen ist sie besser fixiert und stabiler.

2. Höhenverstellung der Tischplatte

Die Höhe der Tischplatte kann stufenlos zwischen 70 und 116,5 cm verändert werden. Dazu lösen Sie die Flügelschraube durch Drehen nach links. Ziehen Sie die Mittelstange bis zur gewünschten Höhe nach oben bzw. nach unten und fixieren Sie diese Position durch Festdrehen der Schraube im Uhrzeigersinn.

3. Fixieren der Standposition

Sie stellen den Beistell-Tisch fest, indem Sie mit Ihrem Fuß die Rollbremse der Doppelrolle nach unten drücken. Die Bremse können Sie durch Hochstellen der Rollenbremse wieder lösen.

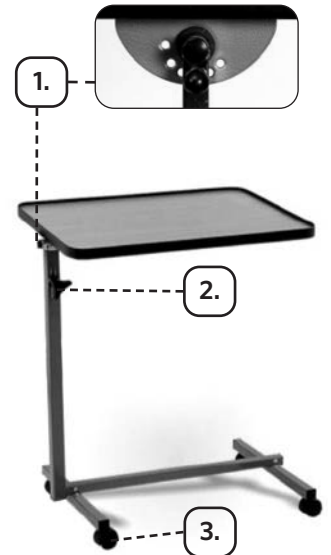

Reinigung

Der Beistell-Tisch ist nur für den Kontakt mit intakter Haut bestimmt. Im Allgemeinen ist eine routinemäßige (feuchte) Wischreinigung hygienisch ausreichend. Für die manuelle Reinigung ist ein milder Haushaltsreiniger zu verwenden. Die Desinfektion ist mit einem DGHM-/VAH-gelisteten, materialverträglichen Flächendesinfektionsmittel durchzuführen. Die Auswahl und Anwendung geeigneter Reinigungs- und Desinfektionsmittel ist entsprechend den jeweiligen Herstellerangaben vorzunehmen.

Wiedereinsatz

Der Beistell-Tisch ist für den mehrfachen Wiedereinsatz geeignet. Er ist entsprechend den Anweisungen zu reinigen und zu desinfizieren. Außerdem ist er durch den Fachhandel auf Schäden zu untersuchen und dann für den Wiedereinsatz freizugeben.

Material

- Säule und Fuß: Stahl
- Rollen/Verstellknöpfe: Stahl mit Kunststoff-Mantel
- Tischplatte: Holzplatte kunststoffbeschichtet, mit Kunststoff-Rahmen

Entsorgung

Entsorgen Sie den Beistelltisch nicht einfach über den normalen Hausmüll. Fragen Sie Ihr kommunales Entsorgungsunternehmen nach der sach- und umweltgerechten Entsorgung in Ihrer Region.

Technische Daten

- Maße Tischplatte: 40 x 60 cm
- Gesamtgewicht: 8,5 kg
- Maximale, mittige Belastbarkeit Tischplatte bei horizontaler Positionierung: 10 kg
- Höhenverstellung: 70-105 cm

Dieses Produkt entspricht der Verordnung 2017/745/EU über Medizinprodukte und trägt eine CE-Kennzeichnung.

Sollte es im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt zu einem schwerwiegenden Vorfall kommen, kontaktieren Sie den Hersteller dieses Produktes unter info@russka.de sowie die zuständige Behörde in Ihrem Land.

Deutschland: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM, www.bfarm.de.

Österreich: Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen BASG, www.basg.gv.at.

Schweiz: Schweizerisches Heilmittelinstitut Swissmedic, www.swissmedic.ch.

Fragen Sie Ihren Fachhändler auch nach dem RUSSKA Ratgeber »Pflege zu Hause«.

Dort lesen Sie Produktinformationen und Anwendungshinweise über weitere Pflegehilfsmittel. Sie finden außerdem praktische und nützliche Tipps für die Pflege im häuslichen Bereich und zum Thema Pflegeversicherung.

